



DIE NEUE GENERATION

easyblast® fill2light




Prozesse perfektionieren



reddot award 2019
winner



Patienten- und Apothekeninformationen auf der Kartenvorderseite

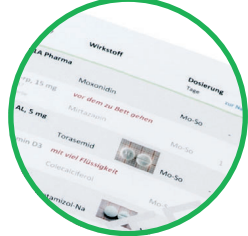

Detaillierter Medikationsplan mit **vollfarbigen Abbildungen** und Dosierungshinweisen



Arzneimittelinformation auf jedem Einnahmezeitpunkt



Sehr übersichtlich: Deutlich markierter Wochentag und Einnahmezeitpunkt sowie Patienteninfo auf jeder Kammer

FERTIGE BLISTERKARTE
Kompatibel mit allen Omnicell Blisterkarten 7x4 und 7x5

Die neue Generation easyblast® fill2light

Sicheres & effizientes Herstellen von Blisterkarten

Das easyblast® fill2light ist ein intelligentes System, das sicher durch den Befüllungsprozess von Blisterkarten führt, somit die Effizienz erhöht, die Mitarbeiter entlastet und alle Schritte dokumentiert.

STANDARDISIERTER PROZESS:

Die Befüllung der Blisterkarte erfolgt nach Übertragung der Daten aus Ihrem Heimversorgungsmodul, nach standardisiertem Prozess:

- Patient scannen
- Medikament scannen
- Belegfoto nach jedem Medikament
- Verschließen der Blisterkarte
- Automatische Generierung eines Protokolls



reddot award 2019
winner

Dokumentierte Sicherheit. Ihre Vorteile auf einen Blick.

OPTISCH ANGELEITETE, SICHERE BEFÜLLUNG DURCH:

- Beleuchtete Bedienführung – auch bei nicht durchgängiger Medikation (z.B. Zweitagesrhythmus)
- Warnungen bei der Auswahl falscher Medikamente oder schon verwendeter Medikamente
- Einlesen von Charge und Verfall über 2D Data Matrix-Code möglich
- Weniger Fehler beim Befüllen

LÜCKENLOSE DOKUMENTATION

- Nach jedem Medikament wird ein Belegfoto erstellt
- Der gesamte Prozess wird in einem detaillierten. Protokoll dokumentiert – HPP Herstell & Prüfprotokoll

ZEITERSPARNIS

- Keine Fehler beim Befüllen bedeuten weniger Aufwand bei der 4-Augen-Kontrolle
- Ständiges Abgleichen mit dem Etikett fällt weg

LEICHTE REINIGUNG

- Glatte Flächen, dadurch leicht zu reinigen

ÜBERSICHTLICHKEIT

- Etikettendruck inkl. Tablettenfoto, Chargen und Verfallsdaten



1 Schritt
Patient scannen




2 Schritt
Medikament scannen



3 Schritt
Medikament befüllen



4 Schritt
Fotodokumentation auslösen

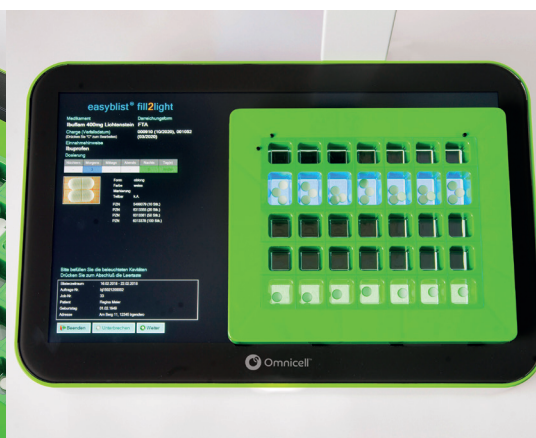

5 Schritt
Belegfoto nach jedem Medikament



6 Schritt
Blisterkarte verschließen



OPTIONAL
MIT SAFETY
MODUL

Safety Modul einfach auf das grüne Lochbrett legen – für noch mehr Übersichtlichkeit bei vielen Medikamenten.

**PROZESSE
PERFEKTIONIEREN.**



**Jetzt Vorführtermin vereinbaren.
info@omnicell.de**

**easyblist® fill2light
www.omnicell.de**