
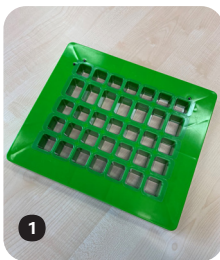
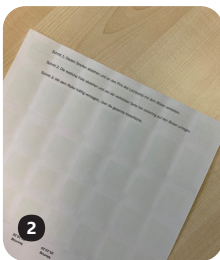
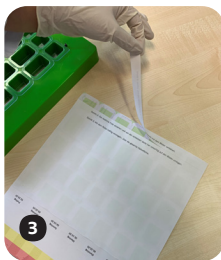
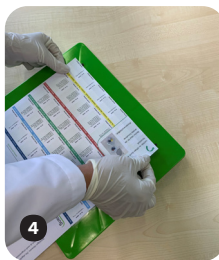
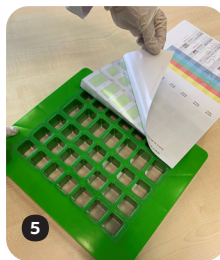


# SureMed™ cup 35 - Der "Besserblister"



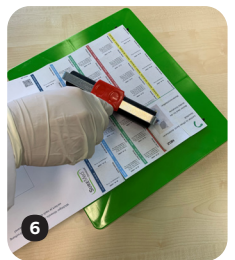


- Saubere Trennung von Datenblatt und Plastik
- Blitzschnelle Medikationsänderungen möglich
- Becher direkt zur Einnahme mit optimierten, abgerundeten Ecken

## SureMed cup 35 - Herstellung


**1**
**Lochbrett mit  
Blistereinsatz**

**2**
**Anleitung auf dem  
Medikamentenblister**

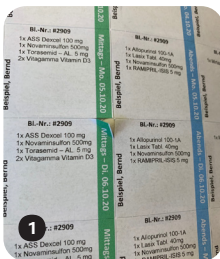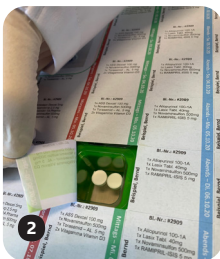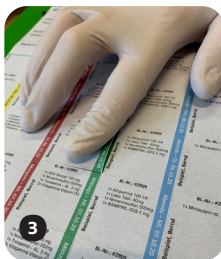**3**
**Ablösen des schmalen  
Streifens**

**4**
**Anlegen an den Pins des  
Lochbrettes**

**5**
**Abziehen der restlichen  
Schutzfolie**

**6**
**Mit dem Roller  
versiegeln**

## SureMed cup 35 - Medikationsänderung


**1**
**Die Papierecke an der  
Blisterseite hochdrücken  
und umlegen**

**2**
**Öffnen und Anpassung  
vornehmen**

**3**
**Wiederverschließen**

**4**
**Mit dem Roller versiegeln**


Produktnr.	Abtrennbarer Medikamentenblister mit Becher-Funktion, Einnahme 7x5	Preis EUR	Menge
3311-35	Medikamentenblister SureMed cup 35, 35 Einnahmen, 250 St. / Karton	132,00	
206-35	Blistereinsatz SureMed cup 35 mit Becherfunktion, für Kaltverklebung. 250 St./Karton	168,00	
584-63	Lochbrett für perforierte Blister 7x5 (Kaltverklebung)	89,00	
660-00	Roller zur druckvollen Verklebung	19,00	

Apotheke, PLZ Ort

Datum

Unterschrift

Stempel

Omnicell GmbH  
Robert-Bosch-Straße 7  
64293 Darmstadt

+49 (0)61 51 - 8 00 16 51  
+49 (0)61 51 - 8 00 16 55  
info@omnicell.com

www.omnicell.de

